

\\ シムジア®オートクリックス®を使用している患者さんへ //



# 注射前の注意点

～キャップの外し方について～


シムジア®オートクリックス®を安全かつ適正にご使用いただくために、  
キャップを外す際には、以下の点にご注意ください。



キャップを左右に真っ直ぐに引っ張り、  
外すようにしましょう。

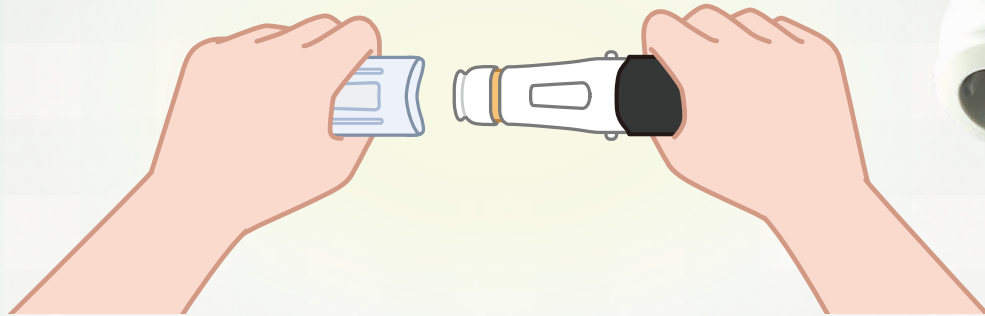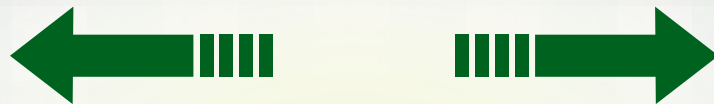

オートクリックス®のキャップ  
を正しく外せていますか？

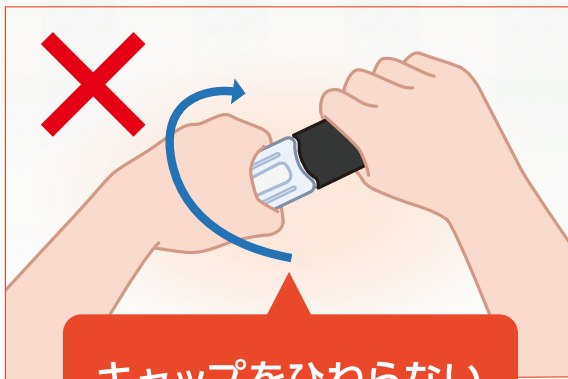

キャップをひねらない

キャップをひねることにより、  
注射針が出ないなどの不具合が生じる  
ことがあります。



注射前に、再度キャップを  
していませんか？



一度外したら、  
再度キャップをしない

再度キャップをすることにより、  
注射前に誤って薬液が飛び出るなどの  
誤作動を起こすことがあります。